



CURATEC® GEL DE LIMPEZA
DEBRIDADOR

INSTRUÇÃO DE USO

DESCRIÇÃO E MECANISMO DE AÇÃO

Curatec® Gel de Limpeza é um gel aquoso com PHMB (antimicrobiano), límpido, incolor, inodoro, não gorduroso e hidratante. Indicado para a limpeza, desbridamento, descontaminação e umidificação de feridas cutâneas agudas (traumáticas ou pós operatórias), crônicas (inclusive feridas profundas) e queimaduras (de primeiro e segundo grau). Pode ser utilizado juntamente com outros curativos para preservar a umidade. Auxilia na prevenção e tratamento da camada de biofilme devido à combinação de seus ingredientes.

INDICAÇÕES

Curatec® Gel de Limpeza é indicado para utilização em cirurgias em que ocorra incisão na pele. Pode ser utilizado para isolamento de áreas contaminadas próximas ao local de incisão como no caso de ostomias, fístulas, drenos e lesões contaminadas. Também pode ser utilizado como fixador e estabilizador de campos cirúrgicos auxiliares.

COMPOSIÇÃO

PHMB, Cocoamidopropil betaína, Hidroxietilcelulose, Propilenoglicol, Imidazolidinil Uréia, EDTA e Água Purificada.

COMPOSIÇÃO

Curatec® Gel de Limpeza é indicado para:

- limpeza, desbridamento, descontaminação e umidificação de feridas cutâneas agudas (traumáticas ou pós operatórias), crônicas (inclusive feridas profundas) e queimaduras (de primeiro e segundo grau);
- hidratação de curativos e de coberturas de feridas, tais como compressas, curativos secundários, gazes, esponjas, hidrofibras, alginatos, hidrocolóides, ou outros materiais absorventes para preservar a umidade da ferida;
- troca de curativos, facilitando o desprendimento de crostas e consequentemente diminuindo a dor durante a remoção dos curativos.

PRECAUÇÕES

Produto para uso externo, não deve ser ingerido.

Mantenha fora do alcance de crianças.

Não exponha os frascos à luz solar direta.

Não utilizar o **Curatec® Gel de Limpeza** caso a embalagem esteja aberta, molhada ou danificada.

A utilização do produto deve sempre ser realizada sob orientação de um profissional de saúde.

Evitar o contato do tubo com a ferida ou com outra fonte de contaminação.

Cada tubo destina-se apenas a um paciente.

Fechar a embalagem imediatamente após cada aplicação.

CONTRAINDICAÇÕES

Não utilizar o produto em associação com tensoativos aniônicos, pois estes podem afetar sua conservação. **Curatec® Gel de Limpeza** não deve ser utilizado em conjunto com outros produtos para limpeza de feridas, tais como: sabonetes, pomadas, óleos ou enzimas, entre outros.

Não utilizar em cartilagem hialina.

Não utilizar em caso de alergia conhecida, ou de suspeita de alergia, a qualquer um dos componentes do produto.

Em caso de reação alérgica ou hipersensibilidade, suspender o uso imediato do produto e procurar orientação médica.

MODO DE USO

Para a utilização do **Curatec® Gel de Limpeza** retire o selo lacre e abra a tampa.

Aplicação Direta do **Curatec® Gel de Limpeza**: aplique sobre o leito da ferida ou cavidades, mantendo uma camada de 3 a 5mm de espessura de acordo com o intervalo de trocas do curativo.

Aplicação Indireta: umidifique as compressas, gazes, ou outras coberturas com **Curatec® Gel de Limpeza** e cubra, ou preencha com eles, a ferida.

O **Curatec® Gel de Limpeza** pode permanecer em contato com a ferida até a próxima troca do curativo.

Nos casos de curativos de difícil remoção, aconselha-se umedecer as compressas com **Curatec® Gel de Limpeza** até que seja possível remover suavemente o curativo, sem traumatizar a superfície da ferida.

Para manter uma hidratação adequada aconselha-se a aplicação de **Curatec® Gel de Limpeza** com maior frequência, até que todas as camadas de tecido necrosado possam ser removidas com facilidade e a ferida apresente-se limpa.

Aconselha-se uma limpeza cautelosa de toda área periférica. A frequência de aplicação irá depender das condições da ferida e deve ser feita sob orientação de um profissional da saúde.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Curatec® Gel de Limpeza deve ser armazenado e transportado à temperatura ambiente, ao abrigo da luz e umidade, mantendo-o na embalagem original e intacta.

Não expor o frasco à luz solar direta.

Fechar a embalagem imediatamente após a aplicação.

VALIDADE

O prazo de validade de dois anos após a data de fabricação é válido seguindo as condições de Armazenamento e Transporte.

APRESENTAÇÕES

- 30mL
- 100mL
- 150mL
- 200mL
- 250mL

**NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM
INDIVIDUAL ESTIVER DANIFICADA/ABERTA.**

Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide envelope

Atendimento ao consumidor SAC: (12) 3202-1300 - sac@curatec.com.br



LM FARMA

Fabricado por:
LM Farma Indústria e Comércio Ltda
R. Jaguarão, 95 - Chácaras Reunidas
São José dos Campos-SP
Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Nesser Cristiano de Paula Oliveira - CRF-SP: 38.464
Registro na ANVISA/MS nº: 80246910017

www.curatec.com.br

REV/00