



CURATEC® HIDROGEL COM ALGINATO

DESCRIÇÃO

Curatec® Hidrogel com Alginato é um gel constituído por água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose que promove o ambiente úmido ideal para a cicatrização por intermédio da hidratação da ferida, conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o desbridamento mecânico. É um curativo primário, absorvente, não estéril, transparente e viscoso.

MECANISMO DE AÇÃO

O alginato, juntamente com a carboximetilcelulose, retém água em sua estrutura, adquirindo a forma de gel. Com esse mesmo princípio, quando usados em feridas exsudativas, ajudam na absorção do exsudato mantendo sua forma de gel. Juntamente com a água e o propilenoglicol, sua estrutura geleificada e hidratada proporciona um ambiente úmido e ideal para cicatrização permitindo o amolecimento de possíveis tecidos inviáveis, que atrasam o processo de cicatrização, favorecendo o seu debridamento autolítico ou facilitando a sua remoção mecânica.

O processo de hidratação da ferida promovido pelo hidrogel com alginato não só estimula a cicatrização da pele, mas também alivia a dor pela umidificação de possíveis terminações nervosas expostas na lesão.

INDICAÇÕES

Indicado para o tratamento de feridas secas, pouco úmidas e de média exsudação, com presença de tecido inviável (necrose e esfacelo) e, também, para o estímulo da granulação e da epitelização com o meio úmido. Pode ser aplicado em feridas de qualquer etiologia. **Curatec® Hidrogel com Alginato** pode ser usado em feridas infectadas sob supervisão médica. Caso exista suspeita de infecção durante o uso do produto, deve-se avaliar a possibilidade de instituir, paralelamente, um tratamento sistêmico.

Essas indicações incluem vários tipos de lesões, como:

- úlceras venosas, arteriais e por pressão;
- queimaduras de segundo grau;
- abrasões;
- lacerações.

CONTRAINDICAÇÕES

O produto não deve ser utilizado em incisões cirúrgicas e em pacientes com conhecida sensibilidade ao produto ou a algum de seus componentes.

A aplicação do **Curatec® Hidrogel com Alginato** não deve exceder o nível da pele ao redor da ferida.

Em caso de irritação (reação alérgica) ou qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, deve-se suspender a utilização imediatamente e procurar orientação médica.

MODO DE USAR

Irigar bem a lesão com solução fisiológica a 0,9% ou conforme protocolo da instituição de saúde;

Secar somente a região periférica;

Aplicar **Curatec® Hidrogel com Alginato** diretamente no leito da ferida – não exceder o nível da pele ao redor da ferida;

Ocluir com uma cobertura secundária e fixar;

Para efetuar a remoção de **Curatec® Hidrogel com Alginato**, irrigar bem o leito da ferida com solução fisiológica, se necessário.

INTERVALOS DE TROCA

Curatec® Hidrogel com Alginato deve ser trocado quando o curativo secundário apresentar sinais de saturação ou quando o curativo for retirado para trocas rotineiras. A necessidade da frequência da troca deve ser avaliada pelo profissional da saúde responsável.

Curatec® Hidrogel com Alginato pode ser deixado na ferida por até três dias. Para feridas infectadas, realizar a troca em, no máximo, 24h.

PRECAUÇÕES

Curatec® Hidrogel com Alginato não é recomendado como único meio de tratamento de feridas sem a consulta de um profissional da saúde. Durante a aplicação, não exceder o nível da pele ao redor da ferida.

Para feridas altamente exsudativas recomenda-se o uso de um curativo com maior capacidade de absorção, como um alginato ou uma espuma, por exemplo.

O uso do produto deve ser monitorado por um profissional da saúde, que deverá aplicar o produto de maneira higiênica, com luvas, para garantir segurança para si próprio e para o paciente.

Descartar a embalagem primária (bisnaga) conforme os procedimentos de manuseio de lixo hospitalar determinado pelo estabelecimento de saúde.

Em caso de irritação (reação alérgica) ou qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, deve-se suspender a utilização imediatamente e procurar orientação médica.

Se a embalagem estiver danificada não utilize o produto.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado e transportado à temperatura ambiente e ao abrigo da luz e umidade, mantendo-o na embalagem original e intacta.

VALIDADE

O prazo de validade de dois anos é válido seguindo as condições descritas no armazenamento. Depois de aberto, deve ser usado em até vinte e oito dias.

APRESENTAÇÃO

O produto é comercializado em bisnagas individuais de alumínio, que são acondicionados em cartuchos ou estojos lacrados com selo de segurança e contendo folheto de instruções de uso.

O produto é comercializado nas apresentações:

- 25g
- 30g
- 85g

Bisnagas de Hidrogel com Alginato 25g e 30g:

As caixas de embarque apresentam 6 cartuchos com 3 bisnagas cada.

Bisnaga de Hidrogel com Alginato 85g:

As caixas de embarque apresentam 12 cartuchos com 1 bisnaga cada.

Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho ou bisnaga.

Atendimento ao consumidor SAC: (12) 3202-1300 - sac@curatec.com.br



Fabricado por: LM Farma Indústria e Comércio Ltda

R. Jaguarão, 95, Chácaras Reunidas - São José dos Campos-SP - CEP 12238-410

Indústria Brasileira

C.N.P.J.: 57.532.343/0001-14

Resp. Técnico: Nesser Cristiano de Paula Oliveira - CRF-SP: 38.464

Registro na ANVISA/MS nº: 80246910008

www.curatec.com.br