



**Curatec® AGE Essencial**  
(Ácidos Graxos Essenciais)  
Curativo

## Instruções de uso:

### DESCRIÇÃO

**Curatec® AGE Essencial** é um produto extraído de óleos vegetais compostos por Ácidos Graxos Essenciais – AGE (Ácidos capríco, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, pentadecanóico, palmítico, palmitoléico, margárico, cis-10-heptadecenóico, esteárico, oleico, t-linoleico, linoleico, t-linolênico, linolênico, araquídico, eicosenóico e behênico), contendo ainda Palmitato de Retinol (vitamina A), Acetato de Tocoferol (vitamina E) que agem na hidratação preventiva, além de possuir propriedades emolientes que protegem a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas.

### INDICAÇÕES

**Curatec® AGE Essencial** é indicado para: aplicação em pele íntegra; para prevenção de úlcera por pressão; feridas agudas e crônicas, com ou sem infecção de qualquer etiologia; feridas com perda de tecido superficial e parcial; dermatites perilesões; queimaduras de primeiro e segundo graus; dermatites amoniacaais; dermatites perigastrostomias; traqueostomias e drenos.

### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Devido à absorção do óleo pelo leito da ferida, sugerimos que o mesmo seja reaplicado após doze horas.

Lavar as mãos antes e depois do procedimento.

Utilizar técnica limpa ou asséptica para execução do procedimento (a escolha deve ser feita pelo profissional de acordo com as características da lesão e do paciente).

Não existem contraindicações ao uso desse produto, a menos que haja histórico de hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação. Em caso de alergias ou hipersensibilidade, suspender o uso imediatamente e procurar orientação médica.

Produto para uso externo, não deve ser ingerido. Mantenha fora do alcance das crianças.

Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Não expor as partes em contato com o produto à luz solar.

Suspender o uso quando o paciente for submetido a sessões de câmara hiperbárica, podendo restabelecer o uso no intervalo dessas sessões.

### MODO DE USO

#### PREVENÇÃO DE FERIDAS

Aplicar **Curatec® AGE Essencial** (Ácidos Graxos Essenciais) nos locais desejados sempre que necessário.

#### TRATAMENTO DE FERIDAS

- Irrigar a lesão com soro fisiológico 0,9%;
- Secar a pele ao redor da ferida;
- Aplicar o óleo diretamente sobre o leito da lesão ou umedecer coberturas estéreis e aplicar sobre a ferida;
- Ocluir com uma cobertura secundária estéril;
- Fixar.

#### INTERVALOS DE TROCA

A frequência de reaplicação do produto dependerá da avaliação prévia do profissional. Sugere-se reaplicação diária para feridas muito exsudativas e a cada doze horas para feridas que apresentem o leito mais desidratado.

#### ARMAZENAMENTO

Mantem o produto na embalagem original, em ambiente fresco e ao abrigo da luz.

#### APRESENTAÇÕES

- frasco com 20 mL;
- frasco com 100 mL;
- frasco com 200 mL.

**O fabricante recomenda o uso único.**

**Não utilizar se a embalagem individual estiver danificada/aberta.**

Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem.

Atendimento ao consumidor SAC: (12) 3202-1300 - [sac@curatec.com.br](mailto:sac@curatec.com.br)



Fabricado por:  
**LM Farma Indústria e Comércio Ltda**  
R. Jaguarão, 95 - Chácaras Reunidas - São José dos Campos-SP  
Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Nesser Cristiano de Paula Oliveira - CRF-SP: 38.464

Registro na ANVISA/MS nº: 80246910043

[www.curatec.com.br](http://www.curatec.com.br)

REV.02